


PRODUCTO	TRAJE QUIRÚRGICO ANTIFLUIDOS DESECHABLE
USO	PRODUCTO DE USO PERSONAL, FUNCIONA COMO BARRERA DE PROTECCIÓN ANTE LA EMISIÓN DE FLUIDOS / NIVEL ALTO DE PROTECCIÓN
TELA	POLIPROPILENO 100% ANTIFLUIDOS PESO : 27 Gr/M2 - 40 Gr/M2 - 50 Gr/M2
REFERENCIA	NORMA EN-13795
HECHO EN	1372
TALLA	COLOMBIA / SODIMCO INTERNACIONAL
	XXS/XS - S/M - L/XL

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

REPELENTE AL AGUA Y EL ACEITE	<p>REF 1372 TRAJE QUIRÚRGICO ANTIFLUIDOS DESECHABLE</p>  <table border="0"> <tr> <td>GORRO CON ELÁSTICO</td> <td>REF 1332</td> </tr> <tr> <td>TAPABOCAS</td> <td>REF 1346</td> </tr> <tr> <td>BATA MANGA LARGA</td> <td>REF 1330</td> </tr> <tr> <td>PANTALÓN</td> <td>REF 1331</td> </tr> <tr> <td>POLAINAS</td> <td>REF 1333</td> </tr> </table>	GORRO CON ELÁSTICO	REF 1332	TAPABOCAS	REF 1346	BATA MANGA LARGA	REF 1330	PANTALÓN	REF 1331	POLAINAS	REF 1333
GORRO CON ELÁSTICO		REF 1332									
TAPABOCAS		REF 1346									
BATA MANGA LARGA		REF 1330									
PANTALÓN		REF 1331									
POLAINAS		REF 1333									
BIODEGRADABLE											
LIVIANO Y CONFORTABLE											
TRANSPIRABLE											
GORRO REDONDO CON ELASTICO Y POLAINAS INDEPENDIENTES											
MANGA LARGA											
PUÑOS AJUSTABLES											
AJUSTE CON TIRAS DE AMARRE											
BATA CORTA CON BLO Y PANTALON CON ELASTICO											

INSTRUCCIONES DE USO

MODO DE COLOCAR	MODO DE QUITAR
1. Quitarse todos los objetos personales (reloj, anillos, pulseras, aretes, celular, entre otros).	1. Asegúrese de tener una bolsa para depositar las prendas infectadas, Retire el gorro y colóquelo en la bolsa, las cuales al finalizar el protocolo deben ser depositadas en la caneca de la basura.
2. Colóquese el protector de calzado.	2. Quítense los guantes externos y deséchelos de una manera segura (use la técnica del paso 6).
3. Lavese las manos con agua y jabón. Posteriormente póngase guantes (guantes de nitrilo para examen).	3. Para sacarse la bata, primero desate los nudos y después tire de atrás hacia adelante, enrollándola de adentro hacia afuera y colóquela en el recipiente de una manera segura.
4. Póngase el pantalón y la bata con la abertura hacia atrás y amarre.	4. Sáquese el equipo de protección ocular tirando de la cuerda detrás de la cabeza y colóquelo en el recipiente de manera segura.
5. Póngase el tapabocas y una careta protectora o gafas protectoras.	5. Quítense la mascarilla cogiendo la parte de atrás y llevándola hacia adelante y colóquela en el recipiente de manera segura. Retírese el protector de calzado y pantalón y colóquelos en el recipiente de una forma segura.
6. Póngase el gorro protector .	6. Quítense los guantes internos cuidadosamente con la técnica apropiada y deséchelos de manera segura junto con todo el kit. . Recuerde lavarse las manos con agua y jabón
7. Póngase otros guantes (preferiblemente de puño largo) sobre el puño de la bata.	

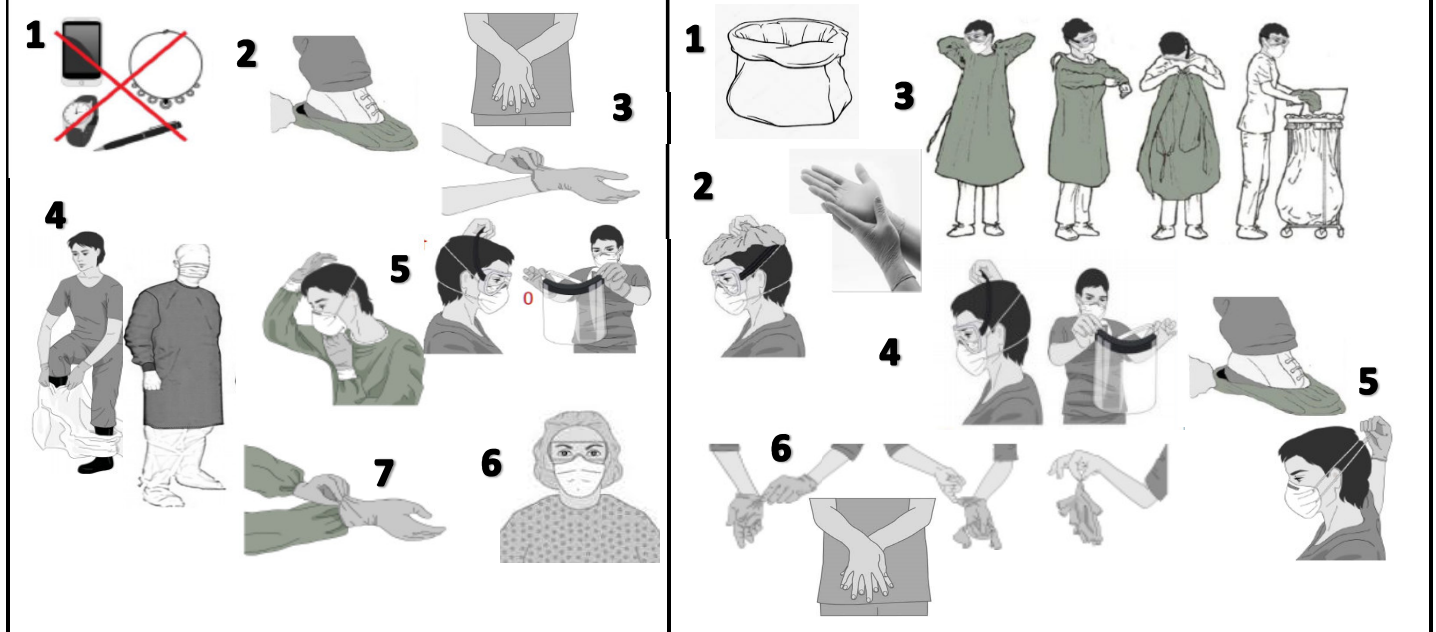

MODO DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN UN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN.