

PRODUCTO	TRAJE QUIRÚRGICO ANTIFLUIDOS REUTILIZABLE
USO	PRODUCTO DE USO PERSONAL, FUNCIONA COMO BARRERA DE PROTECCIÓN ANTE LA EMISIÓN DE FLUIDOS / NIVEL ALTO DE PROTECCIÓN
TELA	POLIÉSTER 100% ANTIFLUIDOS PESO : 111 Gr/M2
REFERENCIA	NORMA EN-13795
HECHO EN	1371
TALLA	COLOMBIA / SODIMCO INTERNACIONAL
	XXS/XS - S/M - L/XL

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

REPELENTE AL AGUA Y EL ACEITE	<p>REF 1371 TRAJE QUIRÚRGICO ANTIFLUIDOS REUTILIZABLE</p>  <p>GORRO CON ELÁSTICO REF 1324 TAPABOCAS REF 1340 BATA MANGA LARGA REF 1322 PANTALÓN REF 1323 POLAINAS REF 1325</p>
LAVABLE (REUTILIZABLE 20 LAVADAS)	
LIVIANO Y CONFORTABLE	
TRANSPIRABLE	
GORRO REDONDO CON ELASTICO Y POLAINAS INDEPENDIENTES	
MANGA LARGA	
PUÑOS AJUSTABLES	
AJUSTE CON TIRAS DE AMARRE	
BATA CORTA CON BLO Y PANTALON CON ELASTICO	

INSTRUCCIONES DE USO

MODO DE COLOCAR	MODO DE QUITAR
1. Quitarse todos los objetos personales (reloj, anillos, pulseras, aretes, celular, entre otros).	1. Asegúrese de tener un recipiente al lado para depositar las prendas infectadas. Retire el gorro y colóquelo en el recipiente.
2. Colóquese el protector de calzado.	2. Quítese los guantes externos y deséchelos de una manera segura (use la técnica del paso 6).
3. Lávase las manos con agua y jabón. Posteriormente póngase guantes (guantes de nitrilo para examen).	3. Para sacarse la bata, primero desate los nudos y después tire de atrás hacia adelante, enrollándola de adentro hacia afuera y colóquela en el recipiente de una manera segura.
4. Póngase el pantalón y la bata con la abertura hacia atrás y amarre.	4. Sáquese el equipo de protección ocular tirando de la cuerda detrás de la cabeza y colóquelo en el recipiente de manera segura.
5. Póngase el tapabocas y una careta protectora o gafas protectoras.	5. Quítese la mascarilla cogiendo la parte de atrás y llevándola hacia adelante y colóquela en el recipiente de manera segura. Retírese el protector de calzado y pantalón y colóquelos en el recipiente de una forma segura.
6. Póngase el gorro protector .	6. Quítese los guantes internos cuidadosamente y con la técnica apropiada y deséchelos de manera segura. Recuerde lavarse las manos con agua y jabón
7. Póngase otros guantes (preferiblemente de puño largo) sobre el puño de la bata.	

MODO DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN UN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN.