


<b>PRODUCTO</b>	BATA QUIRURGICA LARGA ANTIFLUIDOS DESECHABLE
<b>USO</b>	PRODUCTO DE USO PERSONAL, FUNCIONA COMO BARRERA DE PROTECCIÓN ANTE LA EMISIÓN DE FLUIDOS / NIVEL ALTO DE PROTECCIÓN
<b>TELA</b>	POLIPROPILENO 100% ANTIFLUIDOS PESO : 27 Gr/M2 - 40 Gr/M2 - 50 Gr/M2
<b>REFERENCIA</b>	NORMA EN-13795
<b>HECHO EN</b>	1374
<b>TALLA</b>	COLOMBIA / SODIMCO INTERNACIONAL
	XXS/XS - S/M - L/XL

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

<b>REPELENTE AL AGUA Y EL ACEITE</b>	<p><b>REF 1374 BATA QUIRÚRGICA LARGA ANTIFLUIDOS DESECHABLE</b></p>  <p>GORRO CON TIRAS DE AMARRE      REF 1339 TAPABOCAS      REF 1346 BATA MANGA LARGA      REF 1329</p>
<b>BIODEGRADABLE</b>	
<b>LIVIANO Y CONFORTABLE</b>	
<b>TRANSPIRABLE</b>	
<b>GORRO CON TIRAS DE AMARRE</b>	
<b>MANGA LARGA</b>	
<b>PUÑOS AJUSTABLES</b>	
<b>AJUSTE CON TIRAS DE AMARRE</b>	
<b>BATA LARGA CON BLO</b>	

**INSTRUCCIONES DE USO**

<b>MODO DE COLOCAR</b>	<b>MODO DE QUITAR</b>
1. Quitarse todos los objetos personales (reloj, anillos, pulseras, aretes, celular, entre otros).	1. Asegúrese de tener una bolsa para depositar las prendas infectadas, las cuales al finalizar el protocolo deben ser depositadas en la caneca de la basura. y luego proceda a retirar el gorro y colocarlo dentro de la bolsa.
2. Lavese las manos con agua y jabón. Posteriormente póngase guantes (guantes de nitrilo para examen).	2. Quítese los guantes externos y deséchelos de una manera segura (use la técnica del paso 6).
3. Póngase la bata con la abertura hacia atrás y amarre.	3. Quítese el protector de calzado y colóquelo en el recipiente de una forma segura y luego para sacarse la bata, primero desate los nudos y después tire de atrás hacia adelante, enrollándola de adentro hacia afuera y colóquela en el recipiente de una manera segura.
4. Póngase el tapabocas y una careta protectora o gafas protectoras.	4. Sáquese el equipo de protección ocular tirando de la cuerda detrás de la cabeza y colóquelo en el recipiente de manera segura.
5. Póngase el gorro protector .	5. Quítese la mascarilla cogiendo la parte de atrás y llevándola hacia adelante y colóquela en el recipiente de manera segura.
6. Póngase otros guantes (preferiblemente de puño largo) sobre el puño de la bata.	6. Quítese los guantes internos cuidadosamente y con la técnica apropiada y deséchelos de manera segura. Recuerde lavarse las manos con agua y jabón

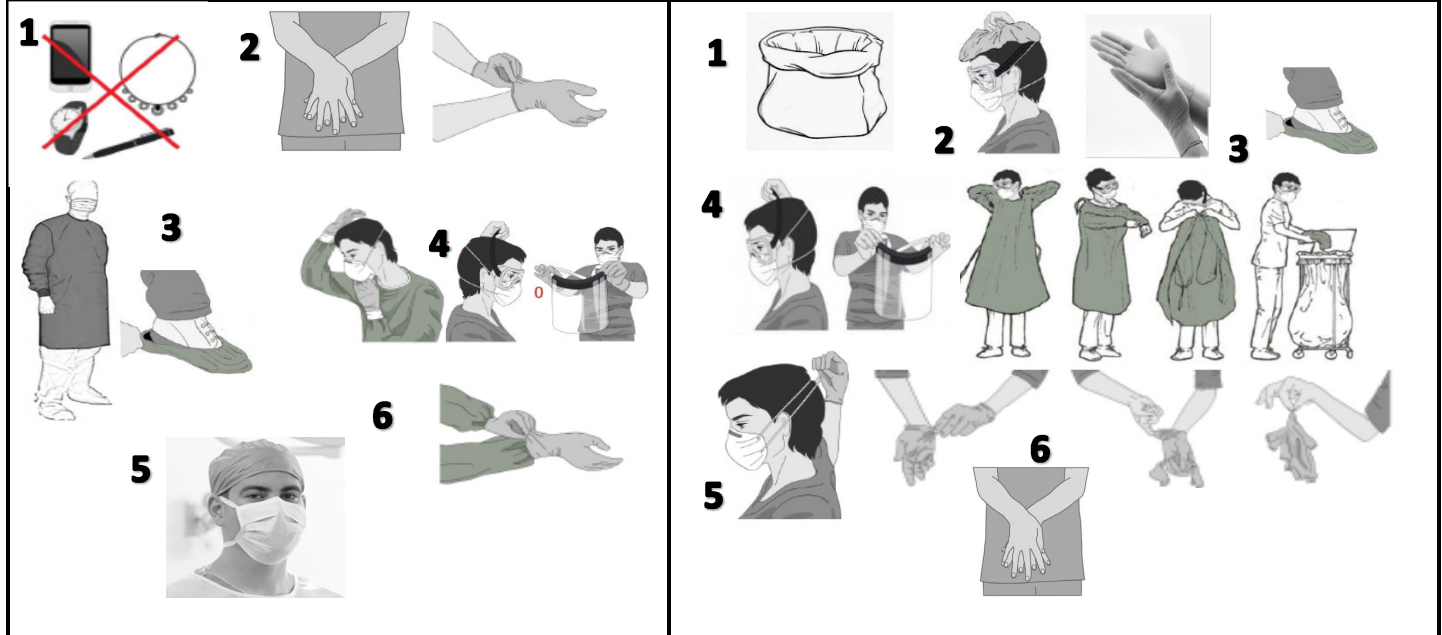

**MODO DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN UN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN.**