



PRODUCTO	BATA QUIRÚRGICA LARGA ANTIFLUIDOS REUTILIZABLE
USO	PRODUCTO DE USO PERSONAL, FUNCIONA COMO BARRERA DE PROTECCIÓN ANTE LA EMISION DE FLUIDOS / NIVEL ALTO DE PROTECCIÓN
TELA	POLIÉSTER 100% ANTIFLUIDOS PESO : 111 Gr/M2
REFERENCIA	NORMA EN-13795
HECHO EN	1373 KIT
TALLA	COLOMBIA / SODIMCO INTERNACIONAL
	XXS/XS - S/M - L/XL

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

REPELENTE AL AGUA Y EL ACEITE	<p>REF 1373 BATA QUIRÚRGICA LARGA ANTIFLUIDOS REUTILIZABLE</p>  <p>GORRO CON TIRAS DE AMARRE REF 1338 TAPABOCAS REF 1340 BATA MANGA LARGA REF 1321</p>
LAVABLE (REUTILIZABLE 20 LAVADAS)	
LIVIANO Y CONFORTABLE	
TRANSPIRABLE	
GORRO CON TIRAS DE AMARRE	
MANGA LARGA	
PUÑOS AJUSTABLES	
AJUSTE CON TIRAS DE AMARRE	
BATA LARGA CON BLLO	

INSTRUCCIONES DE USO

MODO DE COLOCAR	MODO DE QUITAR
1. Quitarse todos los objetos personales (reloj, anillos, pulseras, aretes, celular, entre otros).	1. Asegúrese de tener un recipiente al lado para depositar las prendas infectadas. Retire el gorro y colóquelo en el recipiente
2. Lavese las manos con agua y jabón. Posteriormente póngase guantes (guantes de nitrilo para examen).	2. Quítese los guantes externos y deséchelos de una manera segura (use la técnica del paso 6).
3. Póngase la bata con la abertura hacia atrás, amarre y luego colóquese el protector de calzado (Ver imagen).	3. Quítese el protector de calzado y colóquelo en el recipiente de una forma segura y luego para sacarse la bata, primero desate los nudos y después tire de atrás hacia adelante, enrollándola de adentro hacia afuera y colóquela en el recipiente de una manera segura.
4. Póngase el tapabocas y una careta protectora o gafas protectoras.	4. Sáquese el equipo de protección ocular tirando de la cuerda detrás de la cabeza y colóquelo en el recipiente de manera segura
5. Póngase el gorro protector .	5. Quítese la mascarilla cogiendo la parte de atrás y llevándola hacia adelante y colóquela en el recipiente de manera segura.
6. Póngase otros guantes (preferiblemente de puño largo) sobre el puño de la bata.	6. Quítese los guantes internos cuidadosamente y con la técnica apropiada y deséchelos de manera segura. Recuerde lavarse las manos con agua y jabón

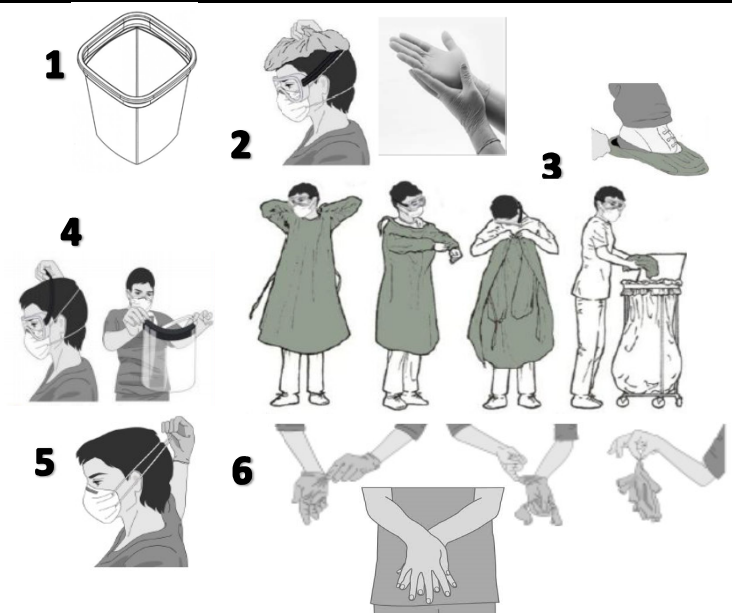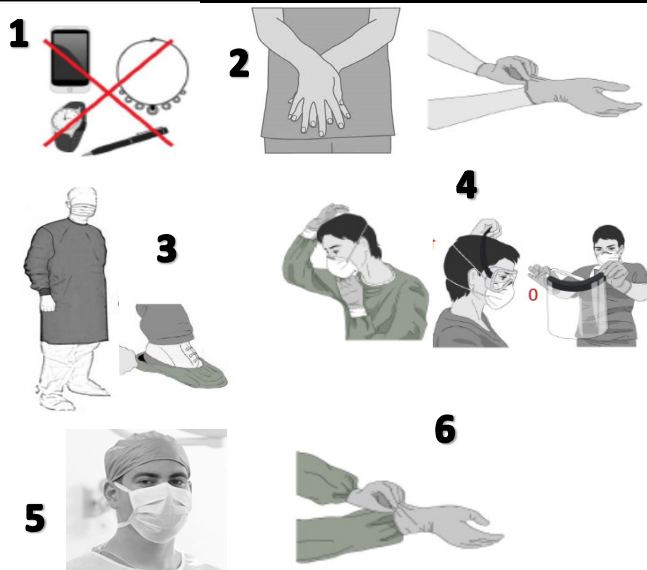

MODO DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN UN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN.