








<b>PRODUCTO</b>	TAPABOCAS DESECHABLES
<b>USO</b>	PRODUCTO DE USO PERSONAL, FUNCIONA COMO BARRERA DE PROTECCIÓN ANTE LA EMISIÓN DE FLUIDOS / NIVEL ALTO DE PROTECCIÓN
<b>TELA</b>	POLIPROPILENO 100% ANTIFLUIDOS PESO : 27 Gr/M2 - 40 Gr/M2 - 50 Gr/M2
<b>REFERENCIAS</b>	NORMA EN-13795
<b>HECHO EN</b>	1346 / 1347 - 1349 / 1350
<b>TALLA</b>	COLOMBIA / SODIMCO INTERNACIONAL
	ADULTO - NIÑO

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

<b>REPELENTE AL AGUA Y EL ACEITE</b>	<p><b>TAPABOCAS DESECHABLES</b></p>  <p><b>1346 ADULTO</b> <b>1347 NIÑO</b></p> <p><b>1349 ADULTO</b> <b>1350 NIÑO</b></p>
<b>BIODEGRADABLE</b>	
<b>LIVIANO Y CONFORTABLE</b>	

### INSTRUCCIONES DE USO

MODO DE COLOCAR	MODO DE QUITAR
1. Lave las manos con agua y jabón.	1. Asegúrese de tener una bolsa para depositar las prendas infectadas, las cuales al finalizar el protocolo deben ser depositadas en la caneca de la basura
2. Tome el tapabocas con los elásticos debajo del dorso de la mano.	2. Sujete la banda inferior del tapabocas, pásela sobre su cabeza hacia adelante.
3. Colóquelo en la cara, tapando nariz y boca (la parte inferior sobre la barbilla) y el sesgo hacia la nariz.	3. Sujete la banda elástica superior y pásela sobre su cabeza hacia adelante.
4. Con la otra mano, coloque la banda elástica inferior alrededor del cuello y por debajo de las orejas.	4. Sujetando las dos bandas aleje el tapabocas de su rostro y deséchelo en un lugar seguro.
5. Lleve la banda elástica superior a la zona más alta posterior de la cabeza.	5. Lávese las manos con agua y jabón
6. Ajuste bien el sesgo a la nariz.	

<p><b>1</b> </p> <p><b>2</b> </p> <p><b>3</b> </p> <p><b>4</b> </p> <p><b>5</b> </p> <p><b>6</b> </p>	<p><b>1</b> </p> <p><b>2</b> </p> <p><b>3</b> </p> <p><b>4</b> </p> <p><b>5</b> </p>
---	---

**MODO DE ALMACENAMIENTO:** ALMACENAR EN UN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN.