


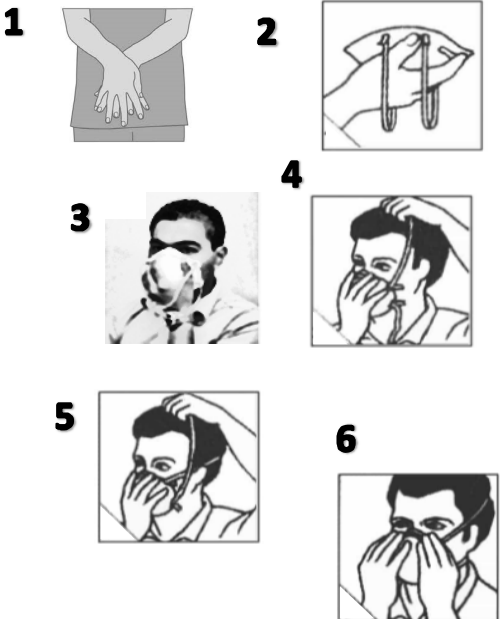

PRODUCTO	TAPABOCAS REUTILIZABLES
USO	PRODUCTO DE USO PERSONAL, FUNCIONA COMO BARRERA DE PROTECCIÓN ANTE LA EMISION DE FLUIDOS / NIVEL ALTO DE PROTECCIÓN
TELA	POLIÉSTER 100% ANTIFLUIDOS PESO : 111 Gr/M2
REFERENCIAS	NORMA EN-13795
HECHO EN	1344 / 1345 - 1342 / 1343
TALLA	COLOMBIA / SODIMCO INTERNACIONAL
	ADULTO - NIÑO

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

REPELENTE AL AGUA Y EL ACEITE	<p>TAPABOCAS REUTILIZABLES</p> 
LAVABLE Y REUTILIZABLE (20 LAVADAS)	
LIVIANO Y CONFORTABLE	
DOBLE CAPA	

INSTRUCCIONES DE USO

MODO DE COLOCAR	MODO DE QUITAR
1. Lavese las manos con agua y jabón.	1. Asegúrese de tener un recipiente al lado para depositar las prendas infectadas.
2. Tome el tapabocas con los elásticos debajo del dorso de la mano.	2. Sujete la banda inferior del tapabocas, pásela sobre su cabeza hacia adelante.
3. Colóquelo en la cara, tapando nariz y boca (la parte inferior sobre la barbilla) y el sesgo hacia la nariz.	3. Sujete la banda elástica superior y pásela sobre su cabeza hacia adelante.
4. Con la otra mano, coloque la banda elástica inferior alrededor del cuello y por debajo de las orejas.	4. Sujetando las dos bandas aleje el tapabocas de su rostro.
5. Lleve la banda elástica superior a la zona más alta posterior de la cabeza.	5. Lavese las manos con agua y jabón
6. Ajuste bien el sesgo a la nariz.	

	
---	--

MODO DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN UN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN.