


<b>PRODUCTO</b>	TRAJE DE AISLAMIENTO ANTIFLUIDOS REFLECTIVO REUTILIZABLE PARA CONSTRUCCIÓN
<b>USO</b>	PRODUCTO DE USO PERSONAL, FUNCIONA COMO BARRERA DE PROTECCIÓN ANTE LA EMISION DE FLUIDOS / NIVEL ALTO DE PROTECCIÓN
<b>TELA</b>	POLIÉSTER 100% ANTIFLUIDOS PESO : 111 Gr/M2
<b>REFERENCIA</b>	NORMA EN-13795
<b>HECHO EN</b>	1390
<b>TALLA</b>	COLOMBIA / SODIMCO INTERNACIONAL
	XXS/XS - S/M - L/XL

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

<b>REPELENTE AL AGUA Y EL ACEITE</b>	<p><b>REF 1390 TRAJE DE AISLAMIENTO ANTIFLUIDOS REFLECTIVO REUTILIZABLE PARA CONSTRUCCION</b></p>  <p>CAPUCHA INDEPENDIENTE REF 1319 TAPABOCAS ANATÓMICO REF 1342 ENTERIZO MANGA LARGA REFLECTIVO REF 1361 POLAINAS REF 1325</p>
<b>LAVABLE (REUTILIZABLE 20 LAVADAS)</b>	
<b>LIVIANO Y CONFORTABLE</b>	
<b>TRANSPIRABLE</b>	
<b>CAPUCHA Y POLAINAS INDEPENDIENTES</b>	
<b>MANGA LARGA</b>	
<b>PUÑOS AJUSTABLES</b>	
<b>TAPABOCAS</b>	
<b>CIERRE EN NYLON DE 60 CM CUBIERTO</b>	

**INSTRUCCIONES DE USO**

<b>MODO DE COLOCAR</b>	<b>MODO DE QUITAR</b>
1. Quitarse todos los objetos personales (reloj, anillos, pulseras, aretes, celular, entre otros).	1. Asegúrese de tener un recipiente al lado para depositar las prendas infectadas.
2. Lavarse las manos con agua y jabón.	2. Qúitese el equipo que cubre la cabeza y el cuello con cuidado para no contaminar la cara, comenzando por la parte trasera inferior de la capucha y enrollándola de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera. Colóquela en el recipiente de manera segura.
3. Póngase guantes (guantes de nitrilo para examen).	3. Qúitese el protector de calzado y colóquelo en el recipiente de una forma segura. Después, sáquese el overol y los guantes externos, abra la cremallera por completo sin tocar la piel ni el traje interno y comience a sacar el overol desde arriba hacia abajo. Después de sacarse el overol de los hombros quítese los guantes externos al mismo tiempo que sacan los brazos de las mangas. Con los guantes internos puestos enrolle el overol desde la cintura hacia abajo y desde adentro y hacia afuera, retirelo completamente y colóquelo en el recipiente de manera segura.
4. Póngase el overol y el protector de calzado (Ver imagen).	4. Qúitese la mascarilla cogiendo la parte de atrás y llevándola hacia adelante y colóquela en el recipiente de manera segura.
5. Póngase el tapabocas, gafas protectoras o careta.	5. Qúitese los guantes internos cuidadosamente con la técnica apropiada y deséchelos de manera segura. Recuerde lavarse las manos con agua y jabón.
6. Póngase equipo para cubrir cabeza y cuello: gorra quirúrgica o capucha que cubra el cuello y los lados de la cabeza.	
7. Póngase otros guantes (preferiblemente de puño largo) sobre el puño de la bata.	

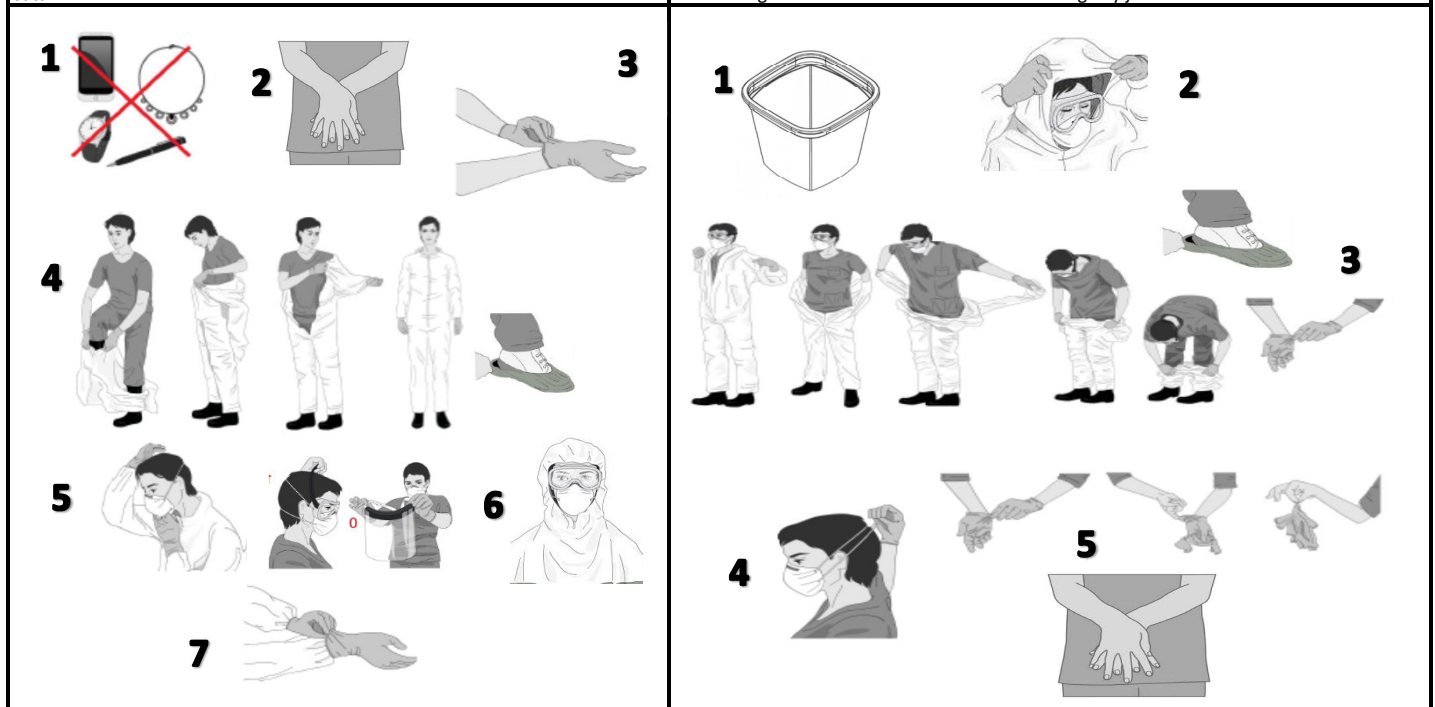

**MODO DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN UN LUGAR LIMPIO, FRESCO Y LIBRE DE CONTAMINACIÓN.**